

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ（JMDNコード：37090010）

F T 卵管鏡（アイピースアダプタ）

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称



2. 作動原理

本製品は、軟性卵管鏡からの像を内視鏡用ビデオカメラのカメラヘッドの撮像面に結像する。アイピースを内視鏡用ビデオカメラに接続した後、着脱レバーを移動させて着脱口に軟性卵管鏡を接続する。その後、フォーカスリングを回転させて、フォーカスを調整する。

※【使用目的又は効果】

使用目的

卵管鏡下卵管形成用の軟性卵管鏡と内視鏡用ビデオカメラとを接続し、像の拡大とフォーカスの調整を行うことを目的とする。

※【使用方法等】

本製品は販売名：F T 卵管鏡、医療機器承認番号：20700BZY00639と併用して使用します。

1. 使用する内視鏡用ビデオカメラのカメラヘッド、F T 卵管鏡、その他周辺機器を接続する。
2. カメラヘッドを回転させてモニター像の位置決めをし、固定する。
3. モニター上でF T 卵管鏡画像のフォーカスをフォーカスリングで調整をしたのちモニター観察をする。
4. 使用後、必要に応じて清拭、洗浄、消毒又は滅菌をする。

【使用上の注意】

- ・本製品を使用するにあたって、無理な力での操作はしないこと。
- ・本製品の清拭、洗浄、消毒又は滅菌方法については、製品の破損等を引き起こさないよう、推奨の方法を参考に設定すること。
- ・術中に機器が故障するなどの予期せぬ事態による手技の中断を避けるために、必ず予備の機器を用意すること。
- ・ビデオアダプタに接続されている本製品を同じ方向に何回も回転させないこと。[カメラヘッドのケーブルがよじれて故障の原因になる]

※【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・直射日光、紫外線の当たる場所は避け、清浄な状態で保管すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

※【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照のこと

1. 使用者による保守点検事項

本製品の使用前に周辺機器との接続部及びフォーカスリングが正常に作動することを確認する。

2. 業者による保守点検事項

本製品に異常が疑われる場合は、直ちに販売業者に連絡の上、修理を依頼すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社新興光器製作所

東京都小金井市貫井北町1丁目6-20

三ツ木小金井ビル

042-312-0082

[販売業者]

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

0120-12-8195 テルモ・コールセンター