


スマートフォン用内視鏡アダプタ

【形状・構造及び原理等】

「各部の名称」

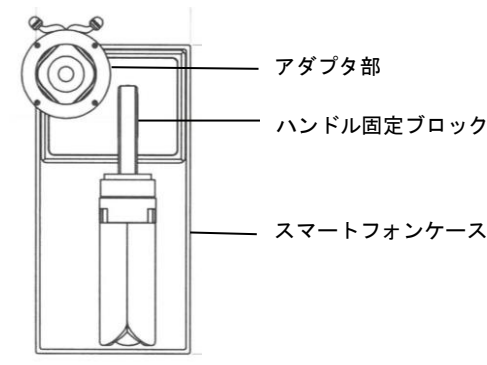

「作動原理」

本製品は既存の軟性及び硬性内視鏡と市販の各種スマートフォンを接続するアダプタで、内視鏡から得られる光学映像は本アダプタからスマートフォンの撮影レンズ部を通し画面に表示される。スマートフォンのカメラアプリを利用し、静止画及び動画を記録、再生する。

【使用目的又は効果】

「使用目的」

既存の軟性又は硬性内視鏡とスマートフォンを接続するアダプタで、内視鏡から得られる光学画像をスマートフォン内のアプリを使用し、動画や静止画として記録、再生する。

【使用方法等】

1. 準備

- 1-1 スマートフォン（薬事対象外）が本アダプタのケース部分にしっかりと装着されていることを確認する。
- 1-2 本製品アダプタ部（内視鏡装着部）のツマミが正常に稼働することを確認する。
- 1-3 本製品アダプタ部（内視鏡装着部）に既存の内視鏡のアイピース部を装着し、ガタや緩みがないかを確認する。

2. 操作

- 2-1 スマートフォン（薬事対象外）の電源が入っていることを確認する。
- 2-2 スマートフォンにインストールされているカメラアプリを起動させ、静止画または動画のモードを選択する。
撮影方法、画像の保存方法等は、使用するスマートフォンの操作方法に従う。

3. 使用後

本製品使用後は、アルコールを含ませたガーゼまたは柔らかい布で清拭する。

※スマートフォンの取扱いについては、各機種取扱説明書を確認し、使用者の判断で行うこと。

【使用上の注意】

- ・本製品を使用する際は、無理な力での操作はしないこと。
- ・本製品の清拭は、製品が破損、変形、変質しないよう推奨の方法で行うこと。
- ・本製品は落下させない様、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

直射日光、紫外線の当たる場所は避け、清浄な状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項
本製品の使用前に必ずアダプタ部のツマミ及びアダプタ固定部に異常がないことを確認する。
2. 業者による保守点検事項
本製品に異常が疑われる場合は、直ちに販売業者に連絡の上、修理を依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社新興光器製作所
東京都小金井市貫井北町 1-6-20 三ツ木小金井ビル
TEL：042-312-0082