

* 2025 年 7 月 (第 2 版)

2023 年 10 月 (第 1 版)

届出番号 20B1X00001000006

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ JMDN : 16779000

アソース コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は軟質ポリ塩化ビニルの長尺チューブである。



* 原材料：ポリ塩化ビニル（可塑剤：DINP）

本品は吸引器と回収容器、排液用チューブと回収容器または吸引嘴管等と接続、延長し、吸引物や浸出液等の移送に用いるチューブである。

【使用目的又は効果】

本品は浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器、排液用チューブと回収容器または吸引カテーテル及び吸引嘴管等との接続、延長に用いる。

【使用方法等】

1. 用途に合わせて本品を必要な長さに切断する。
2. 本品を各種の器具やチューブ類に接続する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 接続部への薬液等の付着に注意すること。接続部のゆるみ等が生じる可能性がある。
2. 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。
3. 未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外に使用しないこと。
4. 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。

5. 本品を折り曲げた状態または引っ張られた状態で使用しないこと。
6. 本品を鉗子でつまんで傷をつけないように、また、注射針の先端、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。
7. 体動でねじると 流路が閉塞する可能性があるので注意すること。
8. 使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

<不具合・有害事象>

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められた場合、直ちに適切な処置をすること。

- 1) その他の不具合
機器の破損変形、閉塞、接続外れ
- 2) 重大な有害事象
感染等

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者> 株式会社イズモヘルス

〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴 6057 番地

TEL : 0263-62-2392

<販売元>



<連絡先>

メディアスホールディングス株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号
TEL : 0120-37-1640