


機械器具 22 検眼用器具  
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (JMDN コード 35148000)  
スリットランプ 900BQ

【形状・構造及び原理等】

下記に本品のパーツを示す。詳細は取扱説明書 外観図を参照。

(スリットランプ 900BQ 本体)

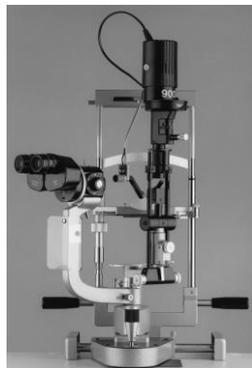

＜アクセサリ類＞

- ・電源ボックス
- ・固視灯付きヘッドレスト
- ・イメージングモジュール IM900
- ・ビームスプリッタ
- ・ズームオブジェクティブ
- ・ステレオパリエータ
- ・20度角アダプタ
- ・コントラストエンハンシングフィルタ
- ・メジャリングアイピース 12.5x
- ・マッキンタイアアイピース 12.5x
- ・アイピース 12.5x クロスヘア付
- ・Cマウントアダプタ 1/2"
- ・Cマウントアダプタ 1/3"
- ・三板ビデオアダプタ
- ・デジタルフォトアダプタ DC01
- ・側視鏡チューブショートタイプ
- ・側視鏡チューブロングタイプ

＜作動・動作原理＞

鏡筒上部に設置された光源が集光レンズ、スリット機構、対物レンズを経て、ミラーにより反射されて被検眼に達する。照らされた部位を双眼実体顕微鏡で観察する。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞

本器は、眼球等の観察、検査及び撮影に用いる細隙灯顕微鏡である。また、他の機器と組み合わせ、眼内圧、角膜厚、前房深度の測定に用いることもある。

【使用方法等】

取扱説明書参照。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 本体部、特に投光系(ランプハウス、スリットミラー等)には無理な力は加えないこと。
- (2) 本器を移動する時はなるべく本体を取り外すこと。止む得ない場合は、本体が回転しないようにヒモ等で固定して、移動するようにすること。
- (3) 光学部品(ミラー、実体顕微鏡等)は汚れやゴミが付着しないように常に注意すること。  
使用後は付属のダストカバーで器械を覆うこと。
- (4) 操作に際してスムーズな動作が不可能になった時は販売店を通して専門技術者に修理を依頼すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品は、使用する前に必ず取扱説明書の内容を理解した上で取り扱うこと。
- (2) 本品の使用者は、医師及び医師の指示を受けた人だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師の指示に基づいて行うこと。

＜過剰使用＞

- (1) 過剰に本器での観察又は測定を行った場合、光障害を起す恐れがある。

\*最大光量での連続使用時間は安全規格(ISO15004-2、ISO10939)で以下のように規定されています。

	スリットランプ 単独	バックグラウンド照 明と併用
タングステン電球	3.2分	2.5分
ハロゲン電球	5.5分	3.5分

＜相互作用＞

- (1) 併用注意  
汎用診断・処置テーブルと接続する場合は、ジャパンフォーカス(株)指定のものを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

\*＜保管条件＞

温度：-10℃～55℃ 湿度：10～95%  
気圧：700～1060hpa

\*\*＜耐用期間＞

20年(自己認証による。本体以外を除く。)  
但し適切な保守点検及び修理を行っている場合に限る。  
[保守用等の部品は製造中止後10年間保持]

【保守・点検に係る事項】

＜保守点検＞

取扱説明書 保守点検参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパンフォーカス株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18  
TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

外国製造業者 HAAG-STREIT AG スイス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611  
株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照ください。