

【禁忌・禁止】

- 揮発性溶剤（アルコール、ガソリンなど）や可燃性の麻酔薬が使用されている潜在的な爆発性の環境で本機を使用しないこと。[爆発の危険がある]

【形状・構造及び原理等】

基本構成は以下の通り。[詳細は取扱説明書を参照。]

- 顕微鏡本体 アレグラ 50
- フロアスタンド FS1-12、*FS1-12LED

顕微鏡本体及びフロアスタンド



<アクセサリ・オプション>

滅菌キャップ
滅菌ガラス
滅菌ガラス用アダプター
ドレープアダプター

*ビームスプリッタ 50/50、70/30、80/20

ビームスプリッタ T

*ヴァーティスコープ

ヴァーティスコープ T

カメラアタッチメント

対物レンズ

アイピースヘッド (160° 10×)

*ダブルイリス

電源コード

<仕様>

顕微鏡本体

- アイピースヘッド
 - ①接眼レンズの倍率 : 12.5×又は 10×
 - ②傾斜角 : 0°固定又は 160°
- 対物レンズの焦点距離 :
f=200~300mm 又は 200~400mm
- 変倍機構 : 手動式、5 段
- 倍率 : 2.2×~30.3× 又は 1.7×~31.6×
- 視野の直径 : 7.0~96.0mm 又は 6.6~121.2mm
- ステレオベース : 25mm
- 照明 : ライトガイド形式、
- 照明野の直径 : 3~118mm
- フォーカス : 電動
- 大きさ : 483mm×319mm×451mm
(アイピースヘッド 0°固定型)
458mm×297mm×451mm
(アイピースヘッド 160°型)

- 重量 : 5.0kg

フロアスタンド

- ベースサイズ : 600×600mm
- 高さ : 1640mm
- 重量 : 80kg (顕微鏡を除く)
- 懸架重量 : 4.5~9kg
- 光源 : ハロゲン 15V/150W
*LED 50W

<電氣的定格等>

- 定格電圧/電源入力 : 100V AC 50/60Hz /400VA
- 電撃に対する保護の形式・程度 : クラス I・B 型装着部

<動作環境>

温度 : 10℃~40℃

相対湿度 : 10%~90% (結露なきこと)

気圧 : 795~1060hpa

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本機は、手術、処置、観察などに必要な作動距離を持ち、観察用光学系、撮影用光学系、照明用光学系を備えた光学的医療機器である。手術用顕微鏡のうち、天井又は壁面等の施設に固定されない可搬型手術用顕微鏡である。

【使用方法等】

使用方法是取扱説明書を参照。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 使用に関しては取扱説明書を必ず参照し、記載されていない手順の実行及び調整は行わないこと。
- 顕微鏡各部やコネクタ部に無理な力がかからない様に注意すること。
- 顕微鏡アームが常にバランスする様に注意を払うこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (4) 本機を移動や位置換えを行う場合は、必ず電源を切って全てのケーブルをはずし、アーム等をトランスポートポジションにすること。
- (5) 眼科用途では、当社が指定した光源を使用し、キセノン光源は使用しないこと。
- (6) ライトガイドから放出される光を決して直接見ないこと。
- (7) 使用前に、全ての機械的及び電氣的接続が正しく確実にされて、それらが損傷していない事を確認すること。
- (8) 技術的な不具合が存在する場合又は想定された場合は使用しないこと。
- (9) 当社指定以外のアクセサリを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

温度：-20℃～70℃ 湿度：10～90%

気圧：600～1060hpa

＜耐用期間＞

5 年（自己認証による。）

但し適切な保守点検及び修理を行っている場合に限る。

[保守用等の部品は製造中止後 10 年間保持]

【保守・点検に係る事項】

- (1) カバーをはずしたり分解を試みたりしないこと。
- (2) 本機の保守点検は取扱説明書の保守・点検の項を参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパンフォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

****外国製造業者** Haag-Streit Deutschland GmbH
ドイツ

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL(03)3815-2611