

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ (JMDN コード : 32692000)
UNIVET 双眼ルーペ

【禁忌・禁止】

- ・本機器を使用して太陽等の強い光を見ないこと。
- ・LED ライトの光源を直接見たり、光源を患者の眼に向けないこと。[眼に障害の恐れがある]
- ・LED ライトは可燃性の麻酔薬等が揮発する環境で使
用しないこと。[爆発の危険がある]

【形状・構造及び原理等】

GALILEAN



PRISMATIC XS



LED ライト

*EOS NEXT



EOS WIRELESS



EOS HP LITE



EOS 2



PRISMATIC



ERGO Advanced

** ONE



**<寸法・質量>

名前	寸法		質量
GALILEAN レンズ部 φ26×25 mm			
Cool	14.5×15.5 cm		2.5×PROHD:56 g 3.5×PROHD:67 g
Look	14×15 cm		2.5×PROHD:54 g 3.5×PROHD:65 g
Techne	14.5×17 cm		2.5×PROHD:56 g 3.5×PROHD:69 g
Techne RX	14.5×17 cm		2.5×PROHD:64 g 3.5×PROHD:75 g
ONE	52-15	13.5×15 cm	2.5×PROHD:54 g
	55-15	14.0×15 cm	3.5×PROHD:65 g
ASH	53-17	14.1×14 cm	2.5×PROHD:55 g 3.5×PROHD:67 g
	55-17	14.5×14 cm	2.5×PROHD:59 g 3.5×PROHD:72 g
ITA	14.5×17 cm		2.5×PROHD:62 g 3.5×PROHD:74 g
EVO™	14.5×18 cm レンズ部 φ30×30 mm		89 g
546	17.5×15.2 cm		56.5 g
AIR-X™	14.5×18 cm レンズ部 φ28×32 mm		89.5 g

名前	寸法		質量
PRISMATIC XS レンズ部 φ 24×58 mm			
Techne	14.5×17 cm		3.5×/4×: 80g 5×: 82g
Techne RX	14.5×17 cm		3.5×/4×: 83g 5×: 85g
ONE	52-15	13.5×15 cm	3.5×/4×: 88g 5×: 89g
	55-15	14.0×15 cm	
ASH	53-17	14.1×14 cm	3.5×/4×: 77g 5×: 79g 3.5×/4×: 79g 5×: 81g
	55-17	14.5×14 cm	
ITA	14.5×17 cm		3.5×/4×: 88g 4×/5×: 90g
PRISMATIC レンズ部 φ 22×60 mm			
AIR-X™	14.5×18 cm レンズ部 φ 22×68 mm		119 g
HEADBAND	19×29 cm		380g
ERGO Advanced			
ONE	55-14	14.0×15 cm	65g

*

名前	寸法	質量
EOS2	100×59×16mm ライト部φ18.5×19.9mm	140g ライト部 11g
EOS HP LITE	118×55×29mm	179g ライト部 28g
EOS WIRELESS	44×30×15mm ライト部φ18.5×41mm	18g ライト部 18g
EOS NEXT	118×55×29mm ライト部φ18.5×41mm	158g ライト部 42g

<原理>

対象物を立体的に観察する複数の倍率バリエーションを持つ双眼光学系により、対象物を拡大して立体的に観察することができる。

また、左右光学系の中心に照明装置を取り付けることにより、対象物の影を極力減らして明るく照らすことが可能となり、その照明効果により焦点深度が深まり、浅部から深部に渡る広範囲な拡大観察が可能となる。複数のメガネフレームのバリエーションを持ち、レンズ部に双眼用拡大光学系を使用者個人に合わせて設置できるシステムを持つことにより、検者に最適な双眼ルーペとなる。

<光学特性>

GALILEAN

倍率	作動距離 [mm]	最大視野 [mm]	最大焦点深度 [mm]
2.0× PRO HD	300～500	165	240
2.5× PRO HD		150	200
3.0× PRO HD		100	130
3.5× PRO HD		70	105

PRISMATIC

3.5×ULTRA HD	300～500	102	115
4.5×ULTRA HD		85	85
6.0×ULTRA HD		52	38

PRISMATIC XS

3.5×XS ULTRA HD	300～500	110	125
4.0×XS ULTRA HD		105	115
5.0×XS ULTRA HD		85	85

** ERGO Advanced

3.5× 4.5× 5.7×	300～500	-	-
----------------------	---------	---	---

<構成部品の材料>

フレーム/つる：ナイロン、アルミニウム、又はチタン(ONE)

ノーズパッド：プラスチックレジン、又は

シリコン(TECHNE、EVO™、546、AIR-X™)

イヤープッド：ナイロン

【使用目的又は効果】

対象物の立体的拡大、照明観察を行う。

【使用方法等】

落下防止のため、必ずストラップを取り付け、頭に合うように調節する。

Cool、Look、Techne、Techne RX、ONE、ASH、546 は双眼ルーペを掛けた状態で対象物を拡大視する。また、EVO™、AIR-X™、HEADBAND は瞳孔間距離を調節し、接眼部を眼に近づけて対象物が中心に見える様調整を行い、拡大観察を行う。

<使用方法に関する使用上の注意>

- (1)使用前にレンズを埋め込んでいる部位に、キズ、ヒビ、接着部等に異常がないことを目視にて確認すること。[使用中、レンズが脱落する恐れがある]
- (2)使用前に各部品にガタ、緩み、ひび等がないことを確認すること。
- (3)本品の使用及及び着脱時、レンズ部に触れないこと。着脱時はつる部を持つこと。
- (4)本品のフレーム部を曲げないこと。視軸がずれたり、レンズが外れたりすることがあります。
- (5)レンズをつかんで左右の幅を広げたり狭めたりしないこと。視軸がずれたり、レンズが外れたりすることがあります。
- (6)LED ライト用電源ユニットの充電時、充電ランプが緑色に変わって充電が完了した時は、電源アダプターを抜いてください[電源アダプターを接続したままであると内部の充電式電池が故障することがある]
- (7)LED ライトのランプハウジング部分は高温になるので10秒以上触れないこと。[火傷の恐れがある]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1)本品の使用者は、医師、医師の指示を受けた人だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師の指示に基づいて行うこと。
- (2)医療機関における医療行為のみに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管条件>

温度：-10℃～50℃ 相対湿度：10～80%

【保守・点検に係る事項】

ルーペ本体は流水での洗浄が行えます。ただし水に浸けないこと。滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパンフォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03) 3815-2611

外国製造業者 Univet Loupes S. p. a. (イタリア)

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03) 3815-2611