



ディスプレイブルシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

禁止

併用医療機器

- ・弊社が指定した機器以外との併用はしないこと[相互作用の項参照]。

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については表示又は本体の記載を確認すること。

製品名	外観写真
ディスプレイブルシリンジ	

原材料：ポリプロピレン、ポリイソブレン

原理：

本品は手動式である。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、液体を注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。

【使用方法等】

使用方法

本品は滅菌済み製品であるため、直ちに使用できる。

一般的な操作方法

1. 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
2. カニューラ等を取り付ける場合は、確実に取り付けること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・包装が破損・汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。
- ・併用する医療機器及び医薬品の添付文書を確認後使用すること。
- ・使用中はコネクターの接続の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。
- ・本品に衝撃を与えないこと[破損する可能性がある]。
- ・接続する場合は、過度な締め付けをしないこと[筒先に破損、空回りが生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある]。
- ・先端のテーパ部分に薬液等を付着させないこと[勘合部の緩み、空回り等が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある]。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

- ・弊社が指定した機器以外との併用はしないこと[指定以外の機器との併用は、設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水濡れに注意し高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号 03-6402-6600（代）

主たる設計を行う製造業者：

コンメドリンパテック社

(Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec)、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。