

電気手術器用接続ケーブル及びフットスイッチ

【禁忌・禁止】

破損、故障及び劣化したフットスイッチを使用しないこと。
接続ケーブルを過剰に折り曲げたり、捻ったりしないこと。
ケーブルをフットスイッチに巻き付けないこと。

* 【形状、構造及び原理等】

1. 形状

①接続ケーブル

- 品番：TW-4000 長さ 680mm
- 品番：TW4000-15 長さ 1500mm
- 品番：TW-4001 長さ 680mm
- 品番：TW-4002 長さ 680mm
- 品番：TW-4003 長さ 1050mm
- 品番：TW-4004 長さ 1050mm
- 品番：TW-4005 長さ 680mm
- 品番：TW-4006 長さ 680mm
- 品番：TW-4007 長さ 680mm
- 品番：TW-4100 長さ 680mm
- 品番：TW-4200 長さ 6200mm

主な接続ケーブル写真



TW-4000



TW-4001



TW-4002



TW-4003



TW-4004



TW-4100

②ダブルフットスイッチ

- ダブルフットスイッチ A 型：左側 DROP 右側 FLUSH
型式：TW-3000（ケーブル長 5m）
TW-3001（ケーブル長 3m）
TW-3002（ケーブル長 7m）
- ダブルフットスイッチ B 型：左側 FLUSH 右側 DROP
型式：TW-3003（ケーブル長 3m）
TW-3004（ケーブル長 5m）
TW-3005（ケーブル長 7m）

写真



③シングルフットスイッチ

- 型式：TW-3100 ケーブル長：5m

写真



原理：

ダブルフットスイッチによりツインティ イリゲーターを作動させる信号を伝達し、接続ケーブルにより併用するバイポーラ凝固止血器に出力信号を伝達する。また、ツインティ イリゲーターを使用しない場合は、シングルフットスイッチによりバイポーラ凝固止血器に出力信号を伝達する。

【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号を伝達するために用いられるケーブルとフットスイッチである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 接続ケーブルをツインティ イリゲーター本体とバイポーラ凝固止血器本体へ接続する。
- ダブルフットスイッチ（DROP、FLUSH 共に動作）又はシングルフットスイッチ（DROP のみ動作）をツインティ イリゲーター本体に接続する。
- ツインティ イリゲーターを使用しない場合は、シングルフットスイッチをバイポーラ凝固止血器本体に接続する。
- 各本体で設定した機能が作動するかどうか、ダブルフットスイッチ又はシングルフットスイッチを踏んで確認する。
- 使用後は、接続したケーブルとフットスイッチを外す。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：ツインティ イリゲーター 届出番号：22BX10024000025」、「販売名：バイポーラコアギュレーター BBC-8000 承認番号：21900BZX00326000」等と併用して使用する。

【使用上の注意】

- 直射日光に当たらず、水のかからない場所に設置する。
- ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置する。
- 接続ケーブル及びダブルフットスイッチは EOG 滅菌、高圧蒸気滅菌しないこと。
- 薬剤やその他の液体及びほこり等を本体内部に侵入させないこと。
- 接続ケーブル及びダブルフットスイッチやシングルフット

スイッチに水をかけないこと[内部の電気回路がショートする等、故障の原因になる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水漏れに注意し、高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
2. 塵埃、腐食性ガスなどの多い場所や、化学薬品によるガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項
 - 1) 始業点検を必ず行い、正常かつ安全な作動を確認する、異常が認められた場合は、直ちに使用を中止する。
 - 2) 点検頻度：使用前に毎回実施
 - ・接続ケーブル及びダブルフットスイッチ又はシングルフットスイッチに破損や断線がないか。
 - ・接続ケーブル及びダブルフットスイッチ又はシングルフットスイッチのプラグを奥まで差し込んでいるか。
 - 3) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐために、付着した血液、体液、組織、薬品等は直ちに消毒用アルコール等で清拭する。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社システム・ジェーピー
TEL 053-545-4700

販売業者：村中医療器株式会社
TEL 0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

関連する取扱説明書を必ずご参照ください。