


BalliQ シリコンノズル

【禁忌】

- ・本品は鼻孔内の分泌物、粘液（鼻水）を取り除く専用品のため、他の目的には使用しないこと。
- ・鼻孔内に病気がある場合、傷、出血や炎症がある場合には使用しないこと。
- ・本品を新生児、乳幼児の手の届くところには保管しないこと。
[ノズル誤飲の恐れがあるため]
- ・使用の際には煮沸消毒を必ず行うこと。[感染症の恐れがあるため]

*【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状

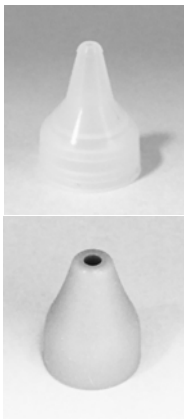

Silicon Nozzle (Narrow Tip)
QB03-241011
全高：18 mm
ノズル先端穴径：φ 1.3 mm
ノズル先端外径：φ 3.3 mm

Silicon Nozzle (Round Tip)
QB03-240311 (Pink)
QB03-240511 (Blue)
QB03-240611 (Yellow)
全高：18 mm
ノズル先端穴径：φ 1.3 mm
ノズル先端外径：φ 5.7 mm

2. 原材料

シリコーンゴム

3. その他の仕様等

耐熱温度：200℃以下（煮沸消毒可能）

*【使用目的又は効果】

吸引器具に接続し吸引を調節又は指示する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前準備

本品は未滅菌のため、使用前に必ず煮沸消毒を行うこと。再使用する場合も同様の処置を行うこと。

2. 使用方法

- (1) 煮沸消毒後は本品の温度が十分に下がっていることを確認する。
- (2) 本品の①本体接続側を吸引器の吸引口に差し込む。
- (3) 本品の②ノズル先端側を患者の鼻孔に軽く押し当て、吸入器を始動させる。

3. 使用後

- (1) 使用後は付着している鼻孔内分泌物、粘液（鼻水）を廃棄してよく洗浄する。
- (2) 煮沸消毒を行い十分に乾燥させ、清潔な場所で保管する。

【使用上の注意】

- ・使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・複数人で共用する場合は煮沸消毒を必ず行うこと。[感染症の恐れがある]
- ・本品に損傷や汚れ等がある場合は使用しないこと。
- ・シンナー、ソルベント、溶剤等で洗浄を行わないこと。

【取扱い上の注意】

組み合わせて使用する電動式可搬型吸引器の添付文書及び取扱説明書を使用前によく読むこと。

【保守・点検に係わる事項】

- ・使用後は必ず洗浄し、煮沸消毒を行い十分に乾燥させておく。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：株式会社ジェイ・シー・ティ
〒731-0138
広島県広島市安佐南区祇園一丁目 28 番 7 号
082-850-3210
製造業者：Living Lab Co., Ltd.
輸入先国：台湾