

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN 34811000

## シージーケー ブロックアウトパテ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

[適用対象]

\*\*・本品に用いられた原材料成分又は類似成分に対して発疹、  
皮膚炎等の過敏症の既往歴のある方は使用しないこと。

[併用医療機器]


\*\*・他社製品と併用をしないこと。

[使用方法]

・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

[形状] パテ状 白色

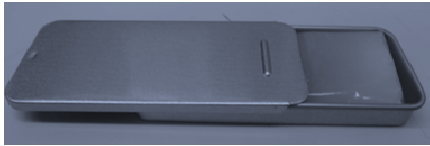

チャック付き袋、スライドケース入り

[構造] 光重合アクリル系レジン・無機質フィラー

[原理] 可視光線により重合

#### 【使用目的又は効果】

\*\*歯科用作業模型において義歯の着脱の障害となるアンダーカット区域へのブロックアウト、又骨隆起部のリリースや作業模型の補正用として使用できる高分子材料。

#### 【使用方法等】

\*\*アンダーカット区域のブロックアウトやリリースする際、石膏やワックスの代わりに用いる。

- 1) 作業模型のアンダーカット及びリリース部に当社製接着剤 LPR (キュアボンド) を薄く塗布する。
- 2) インストルメントに当社専用の器具分離剤を塗布し適量のブロックアウトパテを容器から取り出し、所定の部位に圧接形成する。
- 3) 当社製器具分離剤を塗布したインストルメントまたはポリエチレンフィルムを介して擦り移行部を滑らかに形成する。
- 4) 市販の可視光線重合器にて重合させる。
- \*\*5) ライトパターンでフレーム形成作業する前に必ず形成エリアに当社製分離剤を塗布しておく。
- \*6) 床重合時のレジンと光重合されたパテとの分離のため硬化後のパテに必ず当社製乾式分離剤を塗布すること。
- 7) パテは冬期に硬い場合は容器を温めるとよい。  
前以てインストルメントに当社製ブロックアウトを加熱コーティングしておくとう器具分離材の効果が長く持続する。

#### 【使用上の注意】

[使用方法]


- 1) 鑄造用として使用しないこと。
- 2) ブロックアウトパテは自然光、室内光でも光硬化するので、使用時以外は必ず遮光すること。
- \*\*3) 本材がスライドケースのフタに付着すると、フタが開かなくなるため、袋から取出す際にはみ出さない様に注意すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- \*\*・本材は必ず付属のアルミパックに入れて35℃以下で保管のこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
  - ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

\*\*・包装に記載のとおり [自己認証(当社データ)による]  
※(例 Exp  2020-04: 有効期限 2020年4月を示す)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: シージーケー株式会社

住 所: 〒738-0512

広島市佐伯区湯来町白砂 95-7

T E L: 0829-86-2061