

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

クラウンワックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[適用対象(患者)]

・本材の用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある人などには使用しないこと。

[併用医療機器]


・他社製品との併用をしないこと。

[使用方法]

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状] 角棒状 缶入り

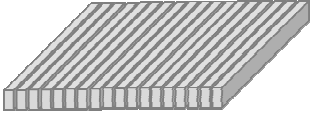

** [種類] 下記の 6 種類となる

種類			内容量
1	MC タイプ (青)	缶入り	50 g
2		角棒状	54 本入り (□5 mm×L97 mm)
3	MC タイプ (赤)	缶入り	50 g
4		角棒状	54 本入り (□5 mm×L97 mm)
5	SC タイプ (緑)	缶入り	50 g
6		角棒状	54 本入り (□5 mm×L97 mm)

[成分] パラフィンワックス，密ロウ，
カルナバワックス
[原理] 加熱によって溶融し、冷却によって凝固する。

【使用目的又は効果】
ロストワックス法によるインレー及びクラウン鑄造用ろう型を製作する時に使用する間接法用ワックス（キャスティングワックス）

【使用方法等】

[使用方法]

・ワックスを軟化させ、作業模型上でインレーやクラウン等の修復物の原型をつくり、鑄造用のロウ型として使用する。

【使用上の注意】

[使用方法]

1) 本材は可燃性のため、使用の際には火傷をしないように注意すること。
2) 換気の良い場所で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・本材を高温となる場所（ストーブの近く等）に放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、1 つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

*・包装のバーコードに記載 [自己認証（当社データ）による]

バーコード下部に記載している数字（17）部分が該当する
例；(01) 04580159620312 (17) 210400 (10) 011160505
上記の有効期間は、2021年4月までを示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：シージーケー株式会社
住 所：〒738-0512
広島市佐伯区湯来町白砂 95-7
T E L：0829-86-2061