

歯07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

セレック・クラウンワックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[適用対象(患者)]

- ・本材の用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある人などには使用しないこと。

[併用医療機器]


- ・他社製品との併用をしないこと。

[使用方法]

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

* [形状] 角棒状 缶入り

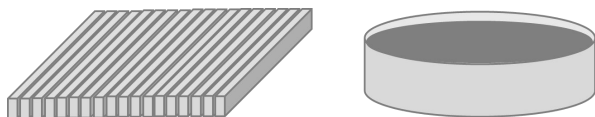

[種類] 下記の4種類となる

種類			内容量
1	ハードタイプ (青)	缶入り	50 g
2		角棒状	54本入り (□5 mm×L97 mm)
3	ソフトタイプ (緑)	缶入り	50 g
4		角棒状	54本入り (□5 mm×L97 mm)

[成分] パラフィンワックス, 密ロウ,
カルナバワックス

[原理] 加熱によって熔融し、冷却によって凝固する。

【使用目的又は効果】

*ロストワックス法によるインレー及びクラウン鑄造用ろう
型を製作する時に使用する間接法用ワックス(キャスティン
グワックス)

【使用方法等】

[使用方法]

- ・ワックスを軟化させ、作業模型上でインレーやクラウン等の修復物の原型をつくり、鑄造用のロウ型として使用する。

【使用上の注意】

[使用方法]

- 1) 本材は可燃性のため、使用の際には火傷をしないように注意すること。
- 2) 換気の良い場所で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所(ストーブの近く等)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

**・包装のバーコードに記載 [自己認証(当社データ)による]

バーコード下部に記載している数字(17)部分が該当する

例; (01) 04580159621067 (17) 210400 (10) 301160505

上記の有効期間は、2021年4月までを示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : シージーケー株式会社

住 所 : 〒738-0512

広島市佐伯区湯来町白砂95-7

T E L : 0829-86-2061