

医04 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 JMDN 70914000

マウスガード材 P0

再使用禁止

【禁忌・禁止】

**[適用対象(患者)]

- ・本品に用いられた原材料成分は類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**[併用医療機器]

- ・他社製品との併用をしないこと。

**[使用方法]

- ・再使用禁止

【使用上の注意】

**[使用方法]

- 1) 使用期間は30日を超えないこと。
- 2) 排気設備の備わった環境で作業すること。
- 3) 本品の研磨作業などの際には、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 本品の研磨作用などの際には粉塵などから目を保護するため、保護眼鏡などを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・直射日光の当たる場所や高温の場所をさけること。
(ストーブの近くなど)
- ・本品に負荷を掛けないこと。
- ・本品を箱より出さず、常温(JIS 準拠)で保管・管理すること。

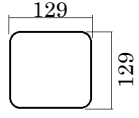
[有効期間]

**・包装に記載のとおり [自己認証(当社データ)による]

※(例 Exp. 2020-04: 有効期間 2020年4月を示す)

【形状・構造及び原理等】

**[形状] 正方形の板状

縦横一辺の長さ(mm)	厚さ(mm)
	2.0
	3.0
	4.0

[構造] オレフィン系エラストマー

[原理] 加熱軟化し、加圧または吸引成型してスプリント等の製作に用いる。

【使用目的又は効果】

歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料

- ・形成しマウスガードやナイトガードとして歯牙に装着して使用する。
- ・歯牙漂白用のトレーやデリバリ用のトレーとして歯牙に装着して使用する。
- ・本品は均一であって、傷、ひび割れ、気泡及び使用上有害な欠点がないこと。

【使用方法等】

1) 軟化準備

吸引または加圧形成器の手順に従い、フレームに所定の厚さのシートをセットする。

この時、シートがフレームからずれないように注意する。

2) 軟化

吸引または加圧形成器のヒーターによりシートを軟化する。

軟化状態を目視で確認し、シートがフレームの下縁より1～1.5cm垂れ下がった状態で吸引、加圧する。

3) 模型の取り出し

シートが完全に冷えた状態で極力変形させないように取り出す。

4) 辺縁の研磨

カーパイトパー等で形態を整え、市販の専用キットまたはシリコンポイント等で研磨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：シージーケー株式会社

住所：〒738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂95-7

T E L：0829-86-2061

販売元：大榮歯科産業株式会社

住所：〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17

T E L：06-6441-3332