

機械器具29 電気手術器
 一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ コード：70657000

BOWA アクセサリー (フットスイッチ)

JBWF0280

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

本品は高周波電気手術器に接続して使用するフットスイッチである。

(代表例)



■外国製造業者

シュトイテ社

(Steute Schaltgeraete GmbH AND Co. KG)

ドイツ

[作動・動作原理]

本品は高周波電気手術器と接続することで、高周波電気手術器に出力信号を伝達する。

【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。一次電源に対する延長の用途を除く。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、以下の電気手術器と接続して使用する。

販売名	承認番号/認証番号
BOWA高周波電気手術器ARC250	22400BZX00186000
BOWA高周波電気手術器ARC303	22800BZX00041000
BOWA高周波電気手術器ARC400	22500BZX00494000
BOWA高周波電気手術器	221ACBZX00011000
エレクトロサージカルデバイスARC350	22200BZX00636000

- フットスイッチの接続コネクタを電気手術器に接続する。
- フットスイッチのペダルを操作し、電気手術器を作動させる。
- 使用后、電気手術器から取り外す。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品を使用する前に、接続する医療機器との動作確認を必ず行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温で清潔に保存すること。

【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

- 使用前の確認
使用前に製品の破損がないことを確認する。
- 洗浄について
使用后、アルコール消毒剤で表面を拭き取る。

[業者による保守点検事項]

- ・本品の修理については弊社に問い合わせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

株式会社ジェイエスエス