

機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 リデューサー コード 70225000
パユンク リデューサーD

再使用禁止

JPJF0072

【禁忌・禁止】

使用方法
・再使用の禁止。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

本品はパユンク社製のトロッカーハウジングに装着するリデューサーである。本品はEOG滅菌品である。
全体図)



[作動・動作原理]

本品は備え付けられているキャップにより、鉗子類の挿入時の気腹ガス漏れを最小限にする。

【使用目的又は効果】

トロカールスリーブに取り付ける器具をいう。作業中のガス漏れを減らし、体腔の気密性を保つことができる。

【使用方法等】

※※【組み合わせて使用する医療機器】

本品は、パユンク トロッカーハウジングR(届出番号：27B1X00040000057)と組み合わせて使用すること。

- 適切なサイズのリデューサーをトロッカーハウジングのキャップに取り付ける。その際、落下防止のために、固定用リングをハウジングに取り付ける。
- 以後、内視鏡手術を進めていく。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 使用前に、本品表面に水滴・異物等が付着していないことを確認する。
- シリコンバルブに損傷が認められた場合、すぐに新しいシリコンバルブに取り替えること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 複数メーカーの内視鏡器具及び付属品と併用する際は、各器具との互換性・適合性等の安全確認を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温で保存すること。

[有効期間]

- 包装の使用期限欄を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

*大阪府中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

■外国製造業者

パユンク社

(Pajunk GmbH Medizintechnologie)

ドイツ

株式会社ジェイエスエス