

## ガンマジル

### \*【禁忌・禁止】

1. 本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
2. 本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

### 〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
- ・ 硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
- ・ 本品をポリエーテル、ポリサルファイド、あるいは縮合型シリコンとともに使用しないこと。
- ・ 適合しない可能性があるため、本品と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。
- ・ キャタリストが影響を受けることがあるため、ゴム製手袋に接触しないようにすること。ビニルあるいはポリエチレン製の手袋を使用することが望ましい。
- ・ 作業は18℃～27℃で行うこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
〔形状〕ペースト状

2. 品目仕様

混和比	1:1	
練和時間	30秒	
操作時間	1分～1分30秒	
硬化時間	6～7分	
シヨア硬度 (A)	A85	85
	A95	95

3. 原材料

ベース及びキャタリスト  
クリストバライト、シロキサン系ポリマー、パラフィン油、着色材他

着色材

4. 包装

- セット(A85、A95共通)
- 1) ベース(420mL)＋計量スプーン(1個)  
キャタリスト(420mL)＋計量スプーン(1個)
  - 2) ベース(5kg)＋計量スプーン(1個)  
キャタリスト(5kg)＋計量スプーン(1個)

### 【使用目的又は効果】

歯科用複模型の作成に用いる。

### \*【使用方法等】

#### 〔使用方法〕

- 1) 計量スプーンを用いてベースとキャタリストを1:1の割合で取る。
- 2) 2材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返して、均一な色調になるまで、指先で十分にこねる。少なくとも30秒間この練和作業を行う。
- 3) 模型に練和物を盛る。
- 4) 硬化時間は、練和開始から6～7分間である。

### 【使用上の注意】

- ・ 本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、速やかに眼科医の診断をうけること。
- ・ 本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
- ・ 本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

5℃～27℃の環境で保管すること。

#### 〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限（製造日より2年）までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（ 20YY / MM は、使用期限 20YY年 MM月を示す）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Müller-Omicron GmbH & Co. KG  
(ミューラー社)

製造国：ドイツ