

アルファジル

【禁忌・禁止】

- ・本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
- ・本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
ベース



A85 タイプ



A95 タイプ

アクティベーター（硬化剤）



2. 品目仕様

練和時間		30 秒
操作時間		1 分 30 秒
硬化時間		6～7 分
ショア硬度 (A)	A85	85
	A95	95

3. 原材料

- ・ベース
：石英、シロキサン系ポリマー、クリストバライト他
- ・アクティベーター
：テトラキス（2-*n*-ブトキシエトキシ）シラン、クリストバライト他

4. 包装

- ・ベース（A85、A95 共通）
1.6Kg＋計量スプーン / 箱
10kg＋計量スプーン / 箱
- ・アクティベーター（硬化剤）
60mL / 箱

【使用目的又は効果】

歯科用複模型の作成に用いる。

【使用方法等】

- 1) 計量スプーンを用いて必要量のベースを取る。
- 2) 以下の割合でアクティベーターを加える。

ベースの種類	計量スプーン 1 杯（12mL / 22.4g）当りの添加量
A85	チューブ口からひも状に 2.5cm（約 0.53ml）
A95	チューブ口からひも状に 2.5cm（約 0.53ml）

- 3) 2 材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返し、均一な色調になるまで、指先で十分にこねる。少なくとも 30 秒間この練和作業を行う。
- 4) 模型に練和物を盛る。
- 5) 硬化時間は、練和開始から 6～7 分間である。
※硬化時間を調整する場合、アクティベーターの添加量は、規定量の最大 25%まで増減が可能である。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意

- ・使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
- ・硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
- ・本品をポリエーテル、ポリサルファイド、あるいは付加型シリコンとともに使用しないこと。
- ・適合しない可能性があるため、本品と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。
- ・作業は 18～25℃の環境下で行うこと。

- 2) アクティベーターに対する重要な基本的注意

- ・本品の揮発物を吸引しないように注意すること。万一吸引した場合には、新鮮な空気に触れさせ、必要に応じて酸素治療を行う。
- ・本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、速やかに眼科医の診断をうけること。
- ・本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
- ・本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

5℃～27℃で保管すること。

【使用期限】

本品に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Müller-Omicron GmbH & Co. KG（ミューラー社）

製造国：ドイツ