

機械器具（35）医療用はさみ
一般医療機器 はさみ JMDN コード：35325001

マイクロシザーAA

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

以下のとおり。

代表例：コーティングなし（直）



コーティング	タイプ
なし	直 / 曲
	ツイスト曲 / 直
	曲（フラットハンドル）
	曲（ラウンドハンドル）
	クロスアクション
T.C 加工	直 / 曲
	直 / 曲（フラットハンドル）
ブラックタイプ	曲
チタンタイプ	曲

2. 原材料

ステンレススチール又はチタン

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

外科手術又は縫合糸切除に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。滅菌温度は下記のとおり）
- 2) 組織や縫合糸等を切断する。

〔滅菌温度〕

タイプ	オートクレーブ温度
T.C 加工（フラットハンドル）	131℃以下
ブラックタイプ	121℃以下
上記以外	134℃以下

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌

〔洗浄〕

使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

〔滅菌〕

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。（オートクレーブ温度は【使用方法】に記載した〔滅菌温度〕に従って行うこと。）

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン