

**2024 年 1 月改訂（第 5 版）
*2019 年 8 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000113


機械器具（39）医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 JMDN コード：10861001

モスキート AA


*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

直

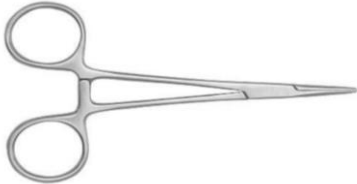

曲

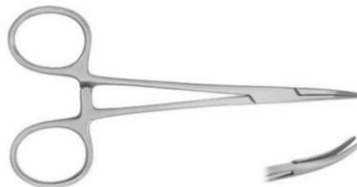

直 ベビー



2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

臓器、組織または血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程も含む 134℃以下厳守）
- 2) ハンドル部を開閉し、目的部位を把持する。ロック部を必要に応じて使用することで先端部の把持が継続される。

**【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン