

ピンセットAA

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

タイプ	
アドソングレーフェ	
刺抜きピンセット	
外科ピンセット	無鉤 有鉤
耳用ピンセット	
鼻用ピンセット	
デュペーキーピンセット無鉤	
ロングタイプ	
外科ピンセット無鉤	
外科用ピンセット(ピン付)	
技工用ピンセット	直 曲
カレッジピンセット(ブラック)	

2. 原材料

- ステンレススチール
・カレッジピンセット(ブラック): ステンレススチール
(チタコーティング)
・技工用ピンセット ハンドル部: パルカンファイバー

3. 包装

1本/包

【使用目的又は効果】

手術用、処置用、又は技工物に使用するピンセット。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が減菌済みかどうか確認すること。
(滅菌温度は下記のとおり)

【滅菌条件】

タイプ	オートクレーブ温度
アドソングレーフェ	乾燥工程を含む134℃以下
刺抜きピンセット	
外科ピンセット 無鉤/有鉤	
耳用ピンセット	
鼻用ピンセット	
デュペーキーピンセット無鉤	
ロングタイプ	
外科ピンセット無鉤	
外科用ピンセット(ピン付)	
技工用ピンセット	
カレッジピンセット	乾燥工程を含む121℃以下

- 2) ハンドル部を開閉し、組織、技工物等を把持する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。(技工用ピンセットは滅菌不可。)
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

- 2) 洗浄・滅菌について

【洗浄】

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

【滅菌】

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。(オートクレーブ温度は【使用方法】に記載した[滅菌条件]に従って行うこと。)

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。

- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

- ・塩素系消毒剤は使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: Adam's Aid Corporation (アダムスエイド社)
製造国: パキスタン