

**2018 年 1 月改訂（第 3 版）

*2017 年 10 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000163

歯科材料（08）歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN コード：34811000

再使用禁止（ニードルチップ）

SP ブロックアウトレジン

*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止（ニードルチップ）
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
本体



付属品（ニードルチップ）



2. 原材料

エトキシレイトドビスフェノール A ジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、シリカ、着色材他

3. 包装

内容量 2g×4 本

付属品：ニードルチップ×8 個

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作成過程で用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

作業模型にてブロックアウトが必要な個所に塗布し、歯科重合用光照射器にて光照射を行い硬化させる。

*【使用上の注意】

- 1) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。
- 2) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄し必要に応じて医師の診断を受けさせること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

2～27℃で保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限（製造日より 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

( 20YY. MM. は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SPIDENT CO., LTD.

（スピデント社）

製造国：韓国