

歯科材料（08）歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDNコード：34811000

再使用禁止（ニードルチップ）

SP ブロックアウトレジン

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止（ニードルチップ）
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 形態変更や改造などはしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社）
製造国：韓国

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
本体



付属品（ニードルチップ）



2. 原材料

エトキシレイトビスフェノールAジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、シリカ、着色材他

3. 包装

内容量 2g×4本
付属品：ニードルチップ×8個

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作成過程で用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

作業模型にてブロックアウトが必要な個所に塗布し、歯科重合用光照射器にて光照射を行い硬化させる。

【使用上の注意】

- 1) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。
- 2) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄し必要に応じて医師の診断を受けさせること。


【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

2～27℃で保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限（製造日より2年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

（ 20YY.MM. は、使用期限 20YY年 MM月を示す）