

ウォッシュパウダーN

【禁忌・禁止】

- ①下の患者には使用しないこと。
 - ・ナトリウム摂取制限を必要とする患者（高ナトリウム血症、妊娠中毒症等）。
 - ・呼吸器疾患のある患者。
 - ・肝臓障害のある患者。
 - ・心機能障害、肺機能障害のある患者。
 - ・口腔内に充血、出血、炎症、その他異常が認められる患者。
 - ・口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者。
 - ・アレルギー体質の患者。
- ②長時間の使用は避け、患者には随時うがいをさせること。
- ③口腔内の軟組織及び歯肉溝に向け直接噴射しないこと。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- ・高温、直射日光を避け、湿気の少ない所で保管すること。
- ・水、有機溶剤、油のかからない場所に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（※例 MM / DD / 20YY は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

*【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕

粉末

〔包装〕

内容量：150 g / 本、12 g / 包

タイプ
レモン味
ミント味
ストロベリー味

【使用目的又は効果】

本品は粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いるものである。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 使用前に本品を軽く 2～3 回振る。
2. 本品を電動式歯面清掃用装置等に補充し、歯面を清掃する。
このときバキュームを使用し、口腔内に溜まったパウダーの溶液を吸い取る。
3. 使用後は速やかにうがい等で口腔内を水洗すること。

【使用上の注意】

- ・本品を使用して清掃する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡等を使用すること。
- ・本品を使用する場合は、バキュームを行うこと。
- ・本品は、本来の用途以外の目的には使用しないこと。
- ・本品が口腔以外の粘膜部分（目・鼻）などに入らないようにすること。
- ・本品を飲み込んだ場合には水で洗浄し、大量の水を飲むこと。
もし気分がすぐれない場合は、医師の診察を受けること。
- ・本品は吸湿しやすいため固まる恐れがあり、湿気にさらさないこと。使用後はボトルの蓋を必ずしっかりと閉めること。
- ・均一にするために、使用前に本品を必ず振ること。
- ・本品を使用する電動式歯面清掃用装置などは、装置メーカーの指示に従って使用すること。
- ・歯科の従事者以外は使用しないこと。