

ウォッシュパウダーN

【禁忌・禁止】

下の患者には使用しないこと。

- ・ナトリウム摂取制限を必要とする患者（高ナトリウム血症、妊娠中毒症等）。
- ・呼吸器疾患のある患者。
- ・肝臓障害のある患者。
- ・心機能障害、肺機能障害のある患者。
- ・口腔内に充血、出血、炎症、その他異常が認められる患者。
- ・口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者。
- ・アレルギー体質の患者。

**【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- ・高温、直射日光を避け、湿気の少ない所で保管すること。
- ・水、有機溶剤、油のかからない場所に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状
粉末

タイプ
レモン味
ミント味
ストロベリー味

2. 原材料
炭酸水素ナトリウム、二酸化珪素、等

3. 包装
内容量：150 g / 本

【使用目的又は効果】

本品は粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いるものである。

【使用方法等】

- 使用前に本品を軽く 2～3 回振る。
- 本品を電動式歯面清掃用装置等に補充し、歯面を清掃する。
このときバキュームを使用し、口腔内に溜まったパウダーの溶液を吸い取る。
- 使用後は速やかにうがい等で口腔内を水洗すること。

【使用上の注意】

- 本品を使用して清掃する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡等を使用すること。
- 本品を使用する場合は、バキュームを行うこと。
- 本品は、本来の用途以外の目的には使用しないこと。
- 本品が口腔以外の粘膜部分（目・鼻）などに入らないようにすること。
- 本品を飲み込んだ場合には水で洗浄し、大量の水を飲むこと。
もし気分がすぐれない場合は、医師の診察を受けること。
- 本品は吸湿しやすいため固まる恐れがあり、湿気にさらさないこと。使用後はボトルの蓋を必ずしっかりと閉めること。
- 均一にするために、使用前に本品を必ず振ること。
- 本品を使用する電動式歯面清掃用装置などは、装置メーカーの指示に従って使用すること。
- 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 長時間の使用は避け、患者には随時うがいをさせること。
- 口腔内の軟組織及び歯肉溝に向け直接噴射しないこと。