

## 再使用禁止

## ポリッシングカップ

### \*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



スクリュータイプ



CAタイプ

2. 原材料

軸部：ステンレススチール  
カップ部：合成ゴム

3. 包装

100個 / 袋

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。  
※回転数は、800～2000r.p.m. で使用すること。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- 2) 指定の回転数（800～2000 r.p.m.）を超えて使用しないこと。
- 3) 使用に際しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- 4) 使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) 目の損傷防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- 6) スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。
- 7) 損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 8) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、パーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- 9) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 10) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

### \*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Reco-Dent International Co., Ltd.  
（レコデントインターナショナル社）  
製造国：台湾