

機械器具（25）医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

PHマイクロミラー

\*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り  
《ミラートップ》



| 製品番号  | ミラーサイズ (mm) |
|-------|-------------|
| 3303  | 3           |
| 3305  | 5           |
| 3306R | 7×2         |
| 3310R | 9×3         |

《ミラーハンドル》



《ハンドル一体型》



| 製品番号  | ミラーサイズ (mm) |
|-------|-------------|
| 1303  | 3           |
| 1305  | 5           |
| 1306R | 7×2         |
| 1310R | 9×3         |

2. 原材料  
ステンレススチール
3. 包装  
各 1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みかどうかを確認する（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
- 2) ミラートップは専用のミラーハンドルと接合させる。
- 3) 口腔内を観察・検査する。

\*【使用上の注意】

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
- 2) 本品を用いた処理により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 3) 子供等の診療・治療時には、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。

- 4) 破損等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ・本品に対する曲げ・切削・加工等
  - ・粗雑な扱い（キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等）
- 5) 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに清拭すること。
- 6) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 7) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 8) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

\*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は、破損、ヒビ、大きな腐食又はミラー部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 使用前にミラー部とハンドル部が確実に装着されているか点検すること。
- 3) 以下の方法及び条件で、患者ごとに、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。

【洗浄】

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

・【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：PRODONT-HOLLIGER (A Company of Acteon Group)  
(プロドント ホリガー社)

製造国：フランス