

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

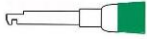
再使用禁止

アキュブラシ

\*【禁忌・禁止】  
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り

| 種類                                                                                |       | カラー    | タイプ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
|  | CA    | グリーン   | やや<br>やわらかめ |
|                                                                                   |       | ライトブルー | やわらかめ       |
|  | スクリュー | グリーン   | やや<br>やわらかめ |
|                                                                                   |       | ライトブルー | やわらかめ       |
|  | ミニ    | ブルー    | かため         |
|                                                                                   |       | グリーン   | やや<br>やわらかめ |
|                                                                                   |       | ライトブルー | やわらかめ       |

2. 包装  
10 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。

※最大回転数：10,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 使用に関しては、ブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・ 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- ・ スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスプレイとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄にたいして錆びやすい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

\*【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：acurata GmbH & Co. KG

（アキュラタ ゲーエムベーハー社）

製造国：ドイツ