

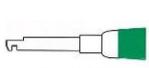
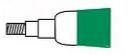
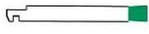
再使用禁止

アキュブラシ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

種類	カラー	タイプ
	グリーン	やや やわらかめ
	ライトブルー	やわらかめ
	グリーン	やや やわらかめ
	ライトブルー	やわらかめ
	ブルー	かため
	グリーン	やや やわらかめ
	ライトブルー	やわらかめ

2. 包装
10本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 選択した本品を歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
- 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
※最大回転数: 10,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 使用に関しては、ブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- スクリュータイプはモーターを逆(左)回転させると外れてしまうので、必ず正(右)回転で使用し、逆(左)回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
- 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄にたいして錆びやすい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: acurata GmbH & Co. KGaA
(アキュラタ ゲーエムベーハー社)

製造国: ドイツ