

再使用禁止

PTCカップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. この製品は天然ゴムを使用しています。

天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

下記の通り

形状				
軸タイプ	スクリュー		CA	
カラー	ブルー	イエロー	ブルー	イエロー
タイプ	レギュラー	ソフト	レギュラー	ソフト

2. 原材料

軸部: 銅

ブラシ部: 天然ゴム

3. 包装

144 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。

※最大回転数: 8,000rpm

推奨回転数: 1,500rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ・使用に関しては無理な力を加えないこと。(無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある)
- ・使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- ・スクリュータイプはモーターを逆(左)回転させると外れてしまうので、必ず正(右)回転で使用し、逆(左)回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形(ひび、割れ、曲がり)等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: DENTEX DENTAL INDUSTRIAL CORP.

(デンテックス デンタル インダストリアル社)

製造国: 台湾