

**2018 年 5 月改訂（第 4 版）

*2017 年 5 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000287

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止

LKポリッシングブラシ

*【禁忌・禁止】

- 1) 本品に対し発疹などの過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 再使用禁止。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造 下記の通り

製品コード	タイプ	外観
LK5300	フラット CA ホワイト	
LK5340	ポイント CA ホワイト	
LK5320	フラットスクリュー ホワイト	
LK5330	ポイントスクリュー ホワイト	
LK5310	フラット CA ブラック	
LK5350	ポイント CA ブラック	

2. 原材料

製品コード	軸部	ブラシ部
LK5300	真鍮（ニッケルメッキ）	ナイロン
LK5340	真鍮（ニッケルメッキ）	ナイロン
LK5320	真鍮（ニッケルメッキ）	ナイロン
LK5330	真鍮（ニッケルメッキ）	ナイロン
LK5310	真鍮（ニッケルメッキ）	動物毛
LK5350	真鍮（ニッケルメッキ）	動物毛

3. 包装

144 個／箱

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
 - 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
 - 3) 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
 - 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
- ※回転数は、800～2000 r.p.m. で使用すること。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の回転数を超過して使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・ 無理な力を加えないこと。（破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。）
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 使用に関しては、プロフィーブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・ 安全のために、保護眼鏡を使用すること。
- ・ スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 本品に対し発疹などの過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800