

再使用禁止

ポリッシングカップPD

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



スクリュータイプ/トルクカップ

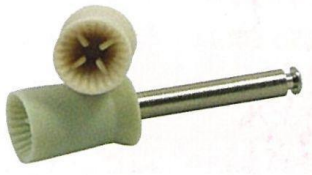

ラッチタイプ

タイプ	カラー
スクリュータイプ	ブルー
ラッチタイプ	グレー
ラッチタイプ	グリーン

2. 原材料

スクリュータイプ
作業部：熱可塑性エラストマー
軸部：銅

ラッチタイプ

作業部：熱可塑性エラストマー
軸部：ステンレススチール

3. 包装

144 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
 - 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
 - 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
 - 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
- ※回転数は、800～2000 r.p.m. で使用すること。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・指定の回転数（800～2000 r.p.m.）を超えて使用しないこと。
- ・使用に際しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・使用に際しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- ・スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 3) 損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Pac-Dent, Inc.（パクデント社）
製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.
（スージョウパクデントテクノロジー社）
製造国：中華人民共和国