

\*\* 2024年1月改訂（第3版）

\* 2017年6月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000323

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDNコード：35768000

再使用禁止

## カラーポリッシングブラシ

### \*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



タイプ	カラー	全長
ソフト / フラット	ピンク	28mm
ミディアム / フラット	イエロー	28mm
ミディアム / ポイント	パープル	30mm

### 2. 原材料

軸部：真鍮  
ブラシ部：ナイロン

### 3. 包装

100本 / 袋

### 【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。  
※推奨回転数：800～2,000rpm  
※最大回転数：10,000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 6) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 7) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 8) 使用に際しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- 9) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、パーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。

### \*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地