

**2024 年 1 月改訂（第 4 版）

*2017 年 4 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000348

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止

ミニポリッシングブラシ

*【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 注意事項を厳守の上、使用すること。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Reco-Dent International Co., Ltd.
（レコデントインターナショナル社）
製造国：台湾

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料
軸部：ステンレススチール
ブラシ部：ナイロン

3. 包装
144 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 2) 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 3) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
※推奨回転数：800～2000rpm
※最大回転数：10000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 6) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 7) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
- 8) 使用に際しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- 9) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。