

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止 P プラスプロフィーブラシ

\*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品に含まれる成分に対して、アレルギー等の過敏症のある患者には使用しないこと。
3. 注意事項を厳守の上、使用すること。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

\*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



スクリュウタイプ



RA タイプ

[レギュラータイプ]

| 形状    | カラー  | タイプ   |
|-------|------|-------|
| RA    | ホワイト | ミディアム |
| スクリュウ | ホワイト | ミディアム |

[カラータイプ]

| 形状    | カラー  | タイプ   |
|-------|------|-------|
| RA    | ピンク  | ソフト   |
| RA    | パープル | ミディアム |
| スクリュウ | ピンク  | ソフト   |
| スクリュウ | パープル | ミディアム |

2. 原材料

ブラシ部：ナイロン  
シャंक部：真鍮（ニッケル加工）

3. 包装

レギュラータイプ：100 個 / 袋  
カラータイプ：50 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

\*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。  
※回転数は、800～2,000r. p. m. で使用すること。  
※最大回転数：10,000r. p. m.

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 使用に関しては、プロフィーブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。
- 6) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 7) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 8) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で本品に触れないこと。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
- 3) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 4) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

\*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Perfection Plus Ltd. （パーフェクションプラス社）  
製造国：イギリス