

機械器具(65) 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN コード：35794000

MDSY PK トーマス

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



代表例：583/1. AL

2. 原材料

ハンドル部：アルミニウム
作業部：ステンレススチール

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品はワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具である。

*【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みであるか確認する。
(オートクレーブ滅菌可、乾燥工程含む 134℃以下厳守)
- 2) 用途にあった本品を選択する。
- 3) 本品の先端を加熱し、その部分でワックスパターンを溶融し作業模型上に盛り上げる。
- 4) ワックスパターンの彫刻、及び形成を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した汚れなどを速やかに除去すること。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※アルカリ性や酸性の水溶液（洗浄液等）に反応し変色する恐れがあるため、中性のものを使用すること。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s. r. l.（メデシー社）
製造国：イタリア