

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

再使用禁止

LKミキシングチップ

****【禁忌・禁止】**
再使用禁止

****【形状、構造及び原理等】**

1. 外観

1) ミキシングチップ



2) オーラルチップ



2. 原材料

ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具をいう。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
- カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に吐出されることを試し出しをして確認する。
- カートリッジ先端にミキシングチップを装着する。必要に応じて各オーラルチップをミキシングチップの先に装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は使用するカートリッジのミキシングチップの装着方法に準じ装着する。またミキシングチップの先端にオーラルチップを装着する際は、カチッと音がするまで押し込む。）
- ディスペンサーガンのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ミキシングチップ内でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

****【使用上の注意】**

- 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地