

ミニキュアリングライト

・【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
2. 光生物学的反応による既往症のある人、あるいは光感作性のある薬を服用している人には、光線に当たらないようにすること。
3. 目を損傷させる恐れがあるので、光源を直視しないこと。

・【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



【付属品】
専用 LED ライト



2. 仕様

寸法	250 mm(L) × 180 mm(W) × 110 mm(H)
重量	1.5Kg
定格電圧	100/120V 60Hz
消費電力	6W
波長	365～405nm
光源	LED

3. 包装

1 セット / 箱

セット内容：本体、専用 LED ライト×2

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工作業における光重合型レジン材料の重合に使用する。

【使用方法等】

【使用方法】

使用前の設定

本体に付属の専用ライトをセットする。

操作方法

- 1) 電源コードを入れる。
- 2) 蓋をゆっくりと開け、テーブルに重合物をセットする。
- 3) 本体後部の電源スイッチをオンにする。
- 4) 約 5 分で自動的にライトが消える。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 感電の恐れがあるので、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないこと。
- 2) 製品に過度の力や衝撃を与えないこと。
- 3) 破損した電源コードを使用しないこと。
- 4) 過度に電源コードを曲げたり、コードの上に重い物を置かないこと。
- 5) 製品側面の換気口をふさがないこと。
- 6) 雷時もしくは、しばらく使用しない場合はコードを抜くこと。
- 7) 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。
- 8) プラグや接触面などのほこりや水をふき取ること。
- 9) 自身で、分解、修理、改造などしないこと。
- 10) 異音、異臭、煙などが出た場合は、ただちにプラグを抜くこと。
- 11) 機器を使用する際には次の事項に注意すること。
 - ・水のかからない場所で使用すること。
 - ・電気暖房機器の近くで使用しないこと。

・【使用上の注意】

- 1) 白内障既往者、網膜障害の既往者、光に対して過敏性反応を起こしたことのある患者、又は光過敏性を誘発する薬剤を使用している患者は使用しないこと。
- 2) 目を損傷させる恐れがあるので、光源を直視しないこと。
- 3) 点灯中または消灯直後のライトやその周囲に手指を触れないこと。やけどの恐れがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 5) 必ず本品付属の専用ライトを使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器の分解・改造はしないこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.
(ソンヨン インターナショナル社)
製造国：台湾