

再使用禁止

プチシリンジ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料 ポリプロピレン

3. 包装 10 本入 / パック

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用前に、本品のミキシングチップを外し、本体に装着されている白いキャップを取り除く（【図 1】参照）。その後、本体にミキシングチップをしっかり装着する。
- 2) カートリッジ（別売）のキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に練和・吐出されることを試し出しをして確認する。
- 3) カートリッジ先端の吐出口に本品を合わせ、ペーストを吐出する。その際、カートリッジの吐出口と本品のペースト挿入口を【図 2】のようにしっかりあわせること。
- 4) プランジャーを本品にセットすること。【図 3】参照。
※プランジャーはセット後、取り外し不可能。

【図 1】



【図 2】



【図 3】



- 5) 本品のプランジャーを操作し、試し出しでペーストが出る事を確認してから、口腔内に直接注入する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 本品のシリンジ内でシリコーン及びレジンが硬化した後に無理な操作をしないこと。
- ・ ペーストを注入する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・ ペーストを吐出した後、カートリッジ吐出口の余分なペーストはしっかり拭き取っておくこと。（硬化不良の原因となる）
- ・ 本品の吐出口サイズに適合しないカートリッジには使用しないこと。
- ・ プランジャーはセット後、取り外し不可能。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間】

- ・ 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Sherpa Korea (シェルパ코리아社)
製造国: 大韓民国

製造業者: CHI FENG CO., LTD (チ フェン社)
製造国: 台湾