

\*\*2024年 1月改訂（第4版）

\*2023年 1月改訂（第3版）

届出番号：17B2X10001000480

歯科材料（07）歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDNコード：70893000

## リセラパラフィン WAX

### \*【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

タイプ	サイズ	厚み	硬さ
ラージ	170×90 mm	2.2 mm	ミディアム
			ハード
レギュラー	145×75 mm	1.6 mm	ミディアム
			ハード

融点：60°C

#### 2. 原材料

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、  
カルナバワックス他

#### 3. 包装

ラージタイプ：500g×2 計 1Kg / 箱

レギュラータイプ：250g×4 計 1Kg / 箱

### 【使用目的又は効果】

本品は主として義歯床の仮床、人口歯の排列などに用いる。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

##### 義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

##### 人口歯の排列

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人口歯を排列する。

##### ロウ堤の作製

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。
- 2) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

- 1) 25°C以下の場所で保管すること。
- 2) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、  
車両内）に放置しないこと。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

#### [使用期限]

包装に記載の使用期限（製造日より2年）までに使用すること。  
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shanghai New Century Dental Materials Co., Ltd

（シャンハイ ニュー センチュリー デンタル マテリアルズ社）

製造国：中華人民共和国