

**2023 年 1 月改訂（第 6 版）

*2017 年 12 月改訂（第 5 版）

届出番号：17B2X10001000516

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

キャスティングワックス

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



サイズ：φ1.0 mm、φ1.5 mm、φ2.0 mm、φ2.5 mm、
φ3.0 mm、φ3.5 mm、φ4.0 mm、φ4.5 mm、φ5.0 mm

2. 原材料

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
着色材

3. 包装

φ1.0～1.5 mm：50g / 箱

φ2.0～5.0 mm：100g / 箱

【使用目的又は効果】

本品はロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製
用に用いる。

【使用方法等】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、義歯のパー、クラ
スプ等の鋳型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適
量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

**【使用上の注意】

- 1) 本品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合は使用しないこと。
- 3) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。
- 4) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意
すること。

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管する
こと。
- 2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場
所、車両内など）に放置しないこと。
- 3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管
しないこと。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Shanghai New Century Dental Materials Co., Ltd

（シャンハイ ニュー センチュリー デンタル マテリアルズ社）

製造国：中華人民共和国