

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN コード：70893000

パーフェクトワックスBK

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



シートサイズ：90 mm×183 mm
融点：62-64℃

2. 原材料
パラフィン、着色剤

【使用目的又は効果】

本品は主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

【使用方法等】

義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列

- 1) 本品を適度に軟化し、巻き棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本品を適度に軟化し、巻き棒状にする
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。
- 3) 本品は本来の用途以外には使用しないこと。
- 4) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。
- 5) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 25℃以下の場所で保管すること。
- ・ 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI
（ビルキム ティビ ウルンラー社）
製造国：トルコ共和国