

** 2022 年 11 月改訂（第 5 版）

届出番号：17B2X10001000534

* 2018 年 7 月改訂（第 4 版）

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

スブルーワックスBK

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



色調：ブルー、グリーン
直径：2.0 mm、4.0 mm
融点：66-68℃

2. 原材料

パラフィン、着色剤

3. 包装

250g / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

【使用方法等】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、鋳型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

〔使用期限〕

- ・ 本品に記載された使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI
（ビルキム ティビ ウルンラー社）
製造国：トルコ共和国