

** 2022 年 11 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000535

* 2017 年 9 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN コード：16189000

インレーワックス B K

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



製品コード	カラー	融点
774	ブルー	68℃

2. 原材料

パラフィン、セレスシン（白色ワックス）、着色剤

3. 包装

100g / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックスをいう。

*【使用方法等】

【使用方法】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、インレー、クラウン、ブリッジの鋳型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI

（ビルキム ティビ ウルンラー社）

製造国：トルコ共和国