

** 2022 年 11 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000536

* 2017 年 9 月改訂（第 2 版、記載要領に基づく改訂）

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

マージンワックスBK

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



融点：63℃
内容量：120g

2. 原材料

パラフィン、セレシン（白色ワックス）、着色剤

3. 包装

120g / 箱

【使用目的又は効果】

本品は主にインレー・クラウンのパターン製作などに用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、インレー・クラウン等の鑄型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI
（ビルキム ティビ ウルンラー社）

製造国：トルコ共和国