

\*\* 2024 年 1 月改訂 (第 4 版)

\* 2022 年 11 月改訂 (第 3 版)

届出番号 : 17B2X10001000536

歯科材料 (07) 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス JMDN コード : 16189000

## マージンワックスBK

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



融点 : 63°C  
内容量 : 120g

2. 原材料  
パラフィン、セレシン (白色ワックス)、着色剤
3. 包装  
120g / 箱

### 【使用目的又は効果】

本品は主にインレー・クラウンのパターン製作などに用いる。

### 【使用方法等】

[使用方法]

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、インレー・クラウン等の鑄型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

[使用期限]

包装に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル  
住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI  
(ビルキム ティビ ウルンラー社)

製造国 : トルコ共和国