

**2022年11月改訂(第3版)

届出番号: 17B2X10001000539


* 2017年9月改訂(第2版、記載要領に基づく改訂)

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス JMDNコード: 16189000

ディッピングワックスBK

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

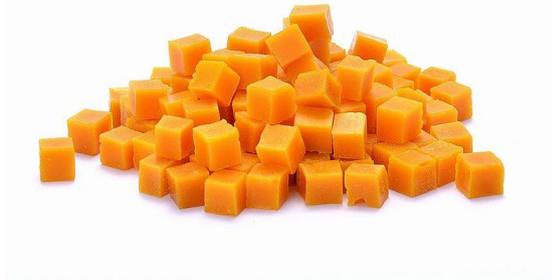

イエロー
レッド

融点: 62-64°C

2. 原材料
パラフィン、セレシン(白色ワックス)、着色剤
3. 包装
750g / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

ワックスポットで溶かして使用する。(使用するポットによって設定温度の表示が異なる場合があるので、適宜調整する。)

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI

(ビルキム ティビ ウルンラー社)

製造国: トルコ共和国