

\*\* 2022年11月改訂(第5版)  
\* 2018年2月改訂(第4版)

届出番号：17B2X10001000543

機械器具(66) 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成へら JMDNコード：38530000

## アルジネートスパチュラ

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造  
下記の通り



全長：225mm

### 2. 原材料

本体：ステンレススチール  
ハンドル部：木

### 3. 包装

1本 / 包

### 【使用目的又は効果】

印象材、石膏等の練和に使用する。

### 【使用方法等】

印象材、石膏等の練和に使用する。

### \*\* 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄(使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し)・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工や改造等を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*\* 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄について
  - ・持ち手部分を木製にしている為、オートクレーブ等の高温を伴う処理は行わないこと。
  - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。  
※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。  
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。  
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：

HANGZHOU ZHONGRUN MEDICAL INSTRUMENT Co., LTD

(ハンゾウ ゾンルン メディカル インストルメント社)

製造国：中華人民共和国