

**2022 年 11 月改訂（第 5 版）

*2019 年 1 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000544

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス JMDN コード：16189000

CAD・CAMワックスBK

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

ユニバーサルタイプ




厚み	直径
14 mm	98 mm
16 mm	
18 mm	
20 mm	
25 mm	

A/Gタイプ



厚み	直径
16 mm	100.6 mm
18 mm	
20 mm	

Z/Zタイプ

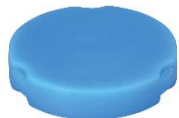

厚み	直径
16 mm	95 mm
18 mm	
20 mm	

DWX/4タイプ



サイズ
76×38×16 mm

2. 原材料

ポリエチレン、パラフィンワックス、着色剤

3. 包装

ユニバーサル、A/G、Z/Z：1個/箱
DWX/4：3個/箱

【使用方法等】

- 1) 本品をミリングマシーンにセットする。
- 2) ミリングマシーンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鑄型用ろう型を製作する。（操作はミリングマシンのマニュアルに準ずる）
- 3) 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん酸塩系）で埋没し、リングファーンズで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 4) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取ること）

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：BILKIM TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI
（ビルキム ティビ ウルンラー社）

製造国：トルコ共和国

【使用目的又は効果】

本品は歯科用CAD・CAM機専用に用いるワックスで固定式補綴修復物のろう型作製用に用いる。