

\*\*2018年5月改訂(第4版)

\*2017年3月改訂(第3版、新記載要領に基づく改訂)

届出番号：17B2X10001000605

歯科材料 (09) 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDNコード：70744000

## C iカーバイトバー HP

### 【禁忌・禁止】

- 1) 注意事項を厳守の上、使用すること。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り  
HP用

形状			
型番	702102	700801	708001
径(Φ)(mm)	2.3	4.0	6.0
回転数(rpm)	15,000~30,000		
タイプ	ウルトラファイン		

2. 原材料

作業部：タングステンカーバイド  
シャンク：ステンレススチール

3. 包装

1本/包

### 【使用目的又は効果】

本品を歯科技工用ハンドピース等に装着し、レジンや歯科用金属を切削するために用いる。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

### \*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：DFS-DIAMON GmbH（ディーエフエス ダイアモン社）

製造国：ドイツ