

機械器具（35）医療用はさみ
一般医療機器 はさみ JMDN コード：35325001

MDSY メツェンバウム剪刀

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

形状		
タイプ	直	直
Item-code	3523	3526
全長	145mm	180mm

形状		
タイプ	曲	曲
Item-code	3524	3527
全長	145mm	180mm

2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 本／包

*【使用目的又は効果】

組織、布、縫合糸等の切断に用いる。

*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済かどうか確認すること（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守）
- 2) 先端の窪みを利用し、糸等を切断する。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- 2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

- 3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・使用後は防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。しばらく使用しない時は防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度（乾燥温度も含む）134℃以下】。
 - ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s.r.l.（メデシー社）
製造国：イタリア